

COMO USAR O MEDPLUS DENTAL

MODO SERINGA

1

LIGUE O EQUIPAMENTO UTILIZANDO A CHAVE LIGA/DESLIGA LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA ESQUERDA

2

ABRA O REGISTRO DO CILINDRO DE OXIGÊNIO LOCALIZADO NO ARMÁRIO INFERIOR DA BANCADA

3

CONECTE A SERINGA À SAÍDA DE OZÔNIO LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO

4

NA TELA DO MENU PRINCIPAL, SELECIONE: "SAÍDA NO BOCAL SUPERIOR" EM SEGUIDA PRESSIONE A OPÇÃO: "MODO SERINGA"

5

NA TELA PRINCIPAL, SELECIONE A CONCENTRAÇÃO DE OZÔNIO E O VOLUME DESEJADO, EM SEGUIDA PRESSIONE A OPÇÃO "LIBERAR"

6

CASO SEJA NECESSÁRIO REALIZAR A SUÇÃO DO EXCESSO DE GÁS OZÔNIO NA SÉRINGA, POSICIONE-A NA SAÍDA DA BOMBA DE VÁCUO E PRESSIONE O BOTÃO "LIGAR"

AO FINALIZAR O PROCESSO, COLOQUE A TAMPA NA SAÍDA DE OZÔNIO, ANTES DE DESLIGAR O EQUIPAMENTO FECHUE O REGISTRO DO CILINDRO DE OXIGÊNIO E EM SEGUIDA DESLIGUE-O NA CHAVE LIGA/DESLIGA LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA ESQUERDA DO MESMO.

1

LIGUE O EQUIPAMENTO UTILIZANDO A CHAVE LIGA/DESLIGA LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA ESQUERDA

2

ABRA O REGISTRO DO CILINDRO DE OXIGÊNIO LOCALIZADO NO ARMÁRIO INFERIOR DA BANCADA

3

CONECTE A MANGUEIRA DA COLUNA À SAÍDA DE OZÔNIO LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO

4

NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA RETIRAR A ROLHA DE SILICONE, ENCAIXAR O FUNIL E ABASTECER COM ÁGUA DE OSMOSE REVERSA.

5

NA TELA PRINCIPAL, SELECIONE “MODO COLUNA” EM SEGUIDA, CONFIGURE A CONCENTRAÇÃO PARA 80 µg/ML DE OZÔNIO E O TEMPO DE 5 MINUTOS. POR ÚLTIMO, PRESSIONE A OPÇÃO “LIBERAR”

6

AO CONCLUIR A GERAÇÃO DE ÁGUA OZONIZADA, DESCONECTE A MANGUEIRA DA SAÍDA DE OZÔNIO E TAMPE-A PARA EVITAR A ENTRADA DE UMIDADE NO APARELHO

PARA DESLIGAR O EQUIPAMENTO, FECHUE O REGISTRO DO CILINDRO DE OXIGÊNIO E DESLIGUE-O NA CHAVE LIGA/DESLIGA.

1

LIGUE O EQUIPAMENTO UTILIZANDO A CHAVE LIGA/DESLIGA LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA ESQUERDA

2

ABRA O REGISTRO DO CILINDRO DE OXIGÊNIO LOCALIZADO NO ARMÁRIO INFERIOR DA BANCADA

3

CONECTE O ADAPTADOR DA MANGUEIRA À CONEXÃO PARA A FERRAMENTA DE MÃO, LOCALIZADA NA PARTE INFERIOR DIREITA DO EQUIPAMENTO. EM SEGUIDA, ACOUPLE A PEÇA DE MÃO À EXTREMIDADE DA MANGUEIRA

4

ACOPLE NA FERRAMENTA DE MÃO O ACESSÓRIO A UTILIZAR: AGULHA PARA APLICAÇÕES LOCALIZADAS OU CAMPÂNULA PARA APLICAÇÕES EM SUPERFÍCIES MAIORES

5

NA TELA PRINCIPAL, SELECIONE A OPÇÃO “FERRAMENTA DE MÃO”. EM SEGUIDA, ESCOLHA O MODO DESEJADO: AGULHA OU CAMPÂNULA.

6

AJUSTE A CONCENTRAÇÃO DE OZÔNIO CONFORME O PROTOCOLO CLÍNICO, DEFINA O TEMPO DE APLICAÇÃO NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO ESPECÍFICO E APERTE O BOTÃO “LIBERAR”

APÓS O TÉRMINO DA LIBERAÇÃO DE OZÔNIO DESCONECTE A FERRAMENTA DE MÃO, DESMONTE OS COMPONENTES E PROCEDA COM A LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO PARA DESLIGAR O EQUIPAMENTO, FECHER O REGISTRO DO CILINDRO DE OXIGÊNIO E DESLIGUE-O NA CHAVE LIGA/DESLIGA.